

Comment **mettre** un masque

How to **put on** a mask

à boucles | with ear loops

1




Pratiquez l'hygiène des mains.
Practise hand hygiene.

2



Tenez le masque par les boucles.
Hold the mask by the ear loops.

3

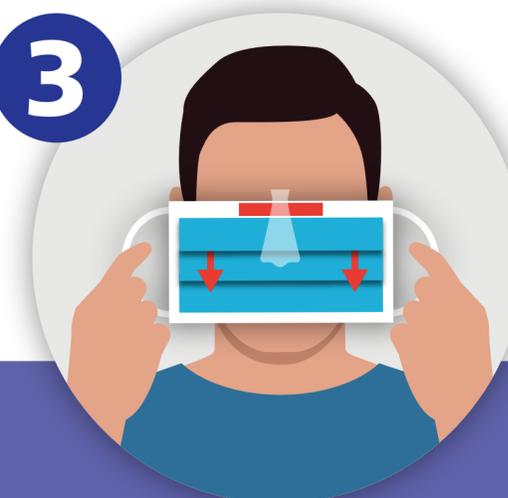

Assurez-vous que la pince nasale en métal est vers le haut et que les plis pointent vers le bas.
The metal nose piece must be on top and the pleats should point down.

4



Passez les fixations derrière les oreilles.
Position the ear loops around your ears.

5



Dépliez complètement le masque pour qu'il couvre le dessus du nez jusque sous le menton.
Fully unfold the mask so that it covers the top of the nose to under the chin.

6



Ajustez la pince nasale sur le nez et les joues.
Place the metal nose piece to fit around the bridge of the nose and cheeks.